

<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	<b>POP N°: 65</b>
<b>Título:</b> Uso do Prolub Manual	<b>Emissão:</b> 01/21
	<b>Revisão:</b> 09/21

## 1. Definição

É o ato de utilizar o Prolub que é uma emulsão lubrificante de alto desempenho composto por óleos minerais sem silicone, tensoativos não iônicos e emulsionantes, com uma formulação balanceada que agrega alto desempenho, proteção e segurança na lubrificação de instrumentos cirúrgicos que serão esterilizados à vapor.

## 2. Objetivo

Padronizar o uso do Prolub para lubrificação de instrumentos cirúrgicos.

## 3. Público-Alvo

Equipe de enfermagem.

## 4. Materiais e Equipamentos Necessários

- EPI adequados, Prolub, recipiente de plástico, compressa, água.
- EPI: Luva nitrílica punho longo, avental SMS manga longa impermeável, máscara cirúrgica, sapato fechado, óculos de proteção individual;

## 5. Descrição do Procedimento

1. Agitar levemente o frasco de Prolub antes de usar.
2. Colocar o Prolub em um recipiente em quantidade suficiente para o uso.
3. Mergulhe os materiais previamente limpos e secos na solução, movimentando as articulações ou aplique o produto (spray) sobre as peças, movimentando as articulações.
4. Deixe escorrer ou retire com auxílio de um pano limpo o excesso do produto.
5. Após o uso do Prolub execute o processo de esterilização à vapor.

## 6. Riscos

Em caso de acidente com o produto químico, medidas de primeiros socorros:

- Pele e contatos com os olhos: lave abundantemente com água.

**OBS:** Qualquer acidente com o produto o enfermeiro deverá preencher a ficha de notificação de acidente de trabalho.

## 7. Referências

- LabNew, **Uso do Prolub.** Ficha técnica. Disponível em: <  
<https://www.labnews.ind.br/produtos/prolub-spray---750-ml.html>> Acessado em  
08/02/2021.

**Elaboração:** ENF Camilla Ferreira Catarino Barreiros - COREN/RJ: 263413.

**Aprovação:** Divisão de Enfermagem (2019-2023).