



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP N°: 67
Título: Limpeza da Secadora BAUMER com Arposafe	Emissão: 03/21
	Revisão: 09/21

1. Definição

É a limpeza semanal da parte interna da secadora Baumer, com detergente de uso hospitalar. A qualidade da água pode interferir de forma negativa nos equipamentos, promovendo incrustações e manchas nos equipamentos.

2. Objetivo

Retirar sujidades comuns e sujidades minerais encontradas no vapor disperso dos produtos para a saúde lavados, utilizando-se detergente de uso hospitalar.

3. Público-Alvo

Equipe de enfermagem.

4. Materiais e Equipamentos Necessários

- Detergente Hospitalar Arposafe na forma líquida a 1% em pulverizador, Escova telescópica e de mão, compressa cirúrgica sem radiopaco; pia inox funda; balde branco com água corrente, bacia pequena; Álcool a 70% frasco de 1 litro, secadora Baumer e seus acessórios
- **EPI:** Túnica do setor, óculos de proteção em acrílico, máscara N 95, capote de SMS impermeável, sapatos fechados, luvas nitrílicas cano longo.

5. Descrição do Procedimento

Todo Sábado:

1. Paramentar-se com todos os EPIs descritos acima;
2. Certificar-se que o equipamento a ser limpo está frio;
3. Retirar as prateleiras, porta traquéias, porta vidros, as duas bandejas perfuradas da base internas existentes dentro do equipamento;
4. Dispor, na 3ª cuba da pia (da porta para o canto) da sala de limpeza, as prateleiras, porta traquéias e porta vidros as duas bandejas perfuradas da base interna existentes dentro do equipamento;
5. Pegar o pulverizador com detergente arposafe na concentração de 1%, verificando o período de validade (15 dias);
6. Manter o pulverizador contrário a face ou ao seu corpo;
7. Virar o pulverizador para a parte que deseja pulverizar o produto;

8. Pulverizar um utensílio por vez;
9. Aguardar 15 minutos.
10. Esfregar o detergente aplicado, com a escova branca específica para lavar equipamentos;
11. Enxaguar abundantemente em água corrente, eliminando completamente a solução;
12. Secar com compressa cirúrgica sem radiopaco;
13. Pulverizar a câmara interna da secadora;
14. Aguardar 15 minutos.
15. Esfregar o detergente aplicado, com a escova telescópica;
16. Esfregar as áreas mais externa da câmara interna por último, evitando encostar-se na área com o produto;
17. Utilizar a escova menor nas áreas que necessitem de uma maior pressão;
18. Deixar a base da secadora por último;
19. Enxaguar em abundância, com compressa cirúrgica embebida em água, até a eliminação completa da solução aplicada;
20. Secar com compressa cirúrgica sem radiopaco;
21. Ao terminar a parte interna do equipamento e seus utensílios, passar álcool à 70% do lado de fora, aguardando o dia da limpeza externa pelo Serviço de Higiene Hospitalar (aos domingos);
22. Recolocar todos os utensílios dentro da secadora.

6. Referências

1. APECIH – **Limpeza, Desinfecção e Esterilização de Artigos em Serviço de Saúde**; 1ª Edição, Associação Paulista de Epidemiologia e Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde, SP. 2010, p. 59 e 60.
2. **Manual do Usuário do Gabinete de Secagem EA-34-03**. BAUMER S.A. Disponível em: <www.baumer.com.br> Acessado 16 de março de 2021.

Elaboração: ENF Luciana Ribeiro Lindolfo COREN/RJ: 74456 e ENF Camilla Ferreira Catarino Barreiros - COREN/RJ: 263413

Revisão: ENF Camilla Ferreira Catarino Barreiros - COREN/RJ: 263413

Aprovação: Divisão de Enfermagem (2019-2023).