

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP N°: 68
Título: Limpeza da Secadora BAUMER com Labseptic	Emissão: 03/21
	Revisão: 09/21

1. Definição

É a limpeza semanal da parte interna da secadora Baumer, com detergente de uso hospitalar. A qualidade da água pode interferir de forma negativa nos equipamentos, promovendo incrustações e manchas nos equipamentos.

2. Objetivo

- Retirar sujidades comuns e sujidades minerais encontradas no vapor disperso dos produtos para a saúde lavados, utilizando detergente de uso hospitalar.

3. Público-Alvo

Equipe de enfermagem.

4. Materiais e Equipamentos Necessários

- Detergente Hospitalar labseptic solução pronto uso em pulverizador, compressa cirúrgica sem radiopaco água corrente, bacia pequena, secadora Baumer e seus acessórios.
- EPI:** Túnica do setor, óculos de proteção em acrílico, máscara N 95, capote de SMS impermeável, sapatos fechados, luvas nitrílicas cano longo.

5. Descrição do Procedimento

1. Paramentar-se com todos os EPIs descritos acima;
2. Certificar-se que o equipamento a ser limpo está frio;
3. Retirar as prateleiras, porta traquéias, porta vidros, as duas bandejas perfuradas da base interna existentes dentro do equipamento;
4. Dispor, na 3ª cuba da pia (da porta para o canto) da sala de limpeza, as prateleiras, porta traquéias e porta vidros as duas bandejas perfuradas da base interna existentes dentro do equipamento;
5. Pegar o pulverizador Labseptic e pulverizar contrário a face ou ao seu corpo;
6. Virar o pulverizador para a parte que deseja pulverizar o produto;
7. Pulverizar um utensílio por vez;
8. É importante aplicar a quantidade suficiente para umedecer totalmente a superfície com o produto e espalhar aplicando ação mecânica (fricção) no movimento;
9. Aguardar 1 minuto.



10. Retirar o excesso do produto com compressa cirurgica sem radiopaco;
11. Secar com compressa cirúrgica sem radiopaco;
12. Pulverizar a câmara interna da secadora;
13. Aguardar 1 minuto e retirar o excesso com compressa cirurgica sem radiopaco;
14. Pulverizar as áreas mais externas da câmara interna por último, evitando encostar-se na área com o produto;
15. Deixar a base da secadora por último;
16. Retirar o excesso com compressa cirurgica sem radiopaco;
17. Secar com compressa cirúrgica sem radiopaco;
18. Recolocar todos os utensílios dentro da secadora.

6. Referências

- APECIH – **Limpeza, Desinfecção e Esterilização de Artigos em Serviço de Saúde**; 1ª Edição, Associação Paulista de Epidemiologia e Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde, SP. 2010, p. 59 e 60.

Elaboração: ENF Luciana Ribeiro Lindolfo COREN/RJ: 74456 e ENF Camilla Ferreira Catarino Barreiros - COREN/RJ: 263413

Revisão: ENF Camilla Ferreira Catarino
Barreiros - COREN/RJ: 263413

Aprovação: Divisão de Enfermagem (2019-2023).