

<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	<b>POP N°: 77</b>
<b>Título:</b> Uso do Oxiclean manual e por lavadora ultrassônica	<b>Emissão:</b> 01/21
	<b>Revisão:</b> 09/21

## 1. Definição

É o ato de utilizar o Oxiclean que é um detergente ácido de baixa espuma, super concentrado, composto por uma mescla de tensoativos não iônicos e ácido fosfórico, para remoção de manchas, ferrugens, crostas minerais e devolvendo o brilho aos instrumentais e câmaras e componentes das termodesinfectoras e autoclaves.

## 2. Objetivo

Padronizar o uso do Oxiclean para remoção de manchas, ferrugens e crostas minerais de instrumentais cirúrgicos, seja manual ou por lavadora ultrassônica.

## 3. Público-Alvo

Equipe de enfermagem.

## 4. Materiais e Equipamentos Necessários

- Instrumentos médico-odontológicos previamente limpos e secos; água aquecida, oxiclean, lavadora ultrassônica (opcional), pano limpo.
- EPI: Luva nitrílica punho longo, avental SMS manga longa impermeável, máscara cirúrgica, sapato fechado, óculos de proteção individual;

## 5. Descrição do Procedimento

Após pré-limpeza e limpeza, o profissional devidamente paramentado com os devidos EPIs, deverá:

### 1. Limpeza Manual:

- Preparar uma solução de limpeza, adicionando 80 ml de OXICLEAN em 1 litro de água aquecida (60°C) ou na mesma proporção em outras quantidades (diluição de 8%);
- Mergulhar completamente os materiais na solução durante 30 minutos, expondo as áreas críticas;
- Desmonte os materiais, quando houver essa condição.



- Fazer ação mecânica a cada 10 minutos;
- Enxaguar em abundância (água corrente), eliminando completamente os resíduos de OXICLEAN em canais e fendas;
- Deixar escorrer a água e secar com pano limpo.

## 2. Limpeza por Lavadora Ultrassônica:

- Preparar a solução de limpeza na cuba da lavadora previamente limpa, adicionando de 10 ml a 50 ml de OXICLEAN para cada 1(litro) litro de água previamente aquecida (60°C) ou na mesma proporção em outras quantidades (diluição de 1% a 5%).
- Em equipamentos com dosagem automática de detergente, programe o dosador para diluição de 1% a 5% (10 ml a 50 ml para cada litro de água).
- Programar para 15 minutos expondo as áreas críticas.
- Desmontar os materiais quando houver essa condição.
- Ao término do ciclo, retire o material da lavadora, enxaguar em abundância (água corrente), eliminando completamente os resíduos de OXICLEAN em canais e fendas.
- Deixar escorrer a água e secar com pano limpo.

## 6. Riscos

### Em caso de acidente com o produto químico, medidas de primeiros socorros:

- Inalação: Retirar-se da exposição e ir para um ambiente com ar fresco.
- Pele: lave abundantemente com água, observe a presença de vermelhidão. Se necessário consulte a enfermeira da Comissão de Curativo ou um médico.
- Contatos com os olhos: Enxague abundantemente com água. As pálpebras devem ser mantidas longe dos globos oculares para assegurar uma lavagem completa. Procure um médico.

**OBS:** Qualquer acidente com o produto o enfermeiro deverá preencher a ficha de notificação de acidente de trabalho.

## 7. Referências

- LabNew, Uso do OXICLEAN. Disponível em: <https://www.labnews.ind.br/produtos/oxiclean---1-litro.html>. Acessado em 04/02/2021.

**Elaboração:** ENF Camilla Ferreira Catarino Barreiros - COREN/RJ: 263413

**Aprovação:** Divisão de Enfermagem (2019-2023).

