

<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	<b>POP N°: 78</b>
<b>Título:</b> Preparo da solução desinfetante de alto nível	<b>Emissão:</b> 06/21
	<b>Revisão:</b> 09/21

## 1. Definição

É o ato de diluir e depositar o saneante *Arposafe*® em recipiente próprio.

## 2. Objetivo

Preparar a solução desinfetante a 5%.

## 3. Público-Alvo

Equipe de enfermagem.

## 4. Materiais e Equipamentos Necessários

- Recipiente plástico com tampa com capacidade de até 10 litros;
- Pia com cuba profunda e torneira;
- Um galão de 5 litros saneante *Arposafe*®;
- Etiqueta e caneta esferográfica.
- **EPI:** Óculos de proteção em acrílico, máscara N 95, capote de SMS impermeável, avental de PVC, sapatos fechados, luvas nitrílicas cano longo.

## 5. Descrição do Procedimento

1. Paramentar-se com os devidos EPIs;
2. Separar no cálice graduado 50 ml do saneante;
3. Conferir descrição do produto, data de validade e registro da ANVISA;
4. Despejar lentamente o saneante, contido no cálice graduado, na solução no recipiente plástico contendo 950 ml de água;
5. Manter o recipiente com a solução fechado, abrindo somente para o teste da solução e para a colocação e retirada dos artigos, da mesma;
6. Fazer a identificação do recipiente da solução preparada, com data, hora e rubrica de quem preparou, em etiqueta;

7. A solução poderá ficar em uso por até 15 dias, de acordo com a recomendação do fabricante;
8. Desprezar a solução, diretamente em pia do expurgo, após a data recomendada pelo fabricante e/ou caso o teste da fita não haja alteração para a cor azul.

## 6. Referências

- **Arposafe Multi.** Assistência à Saúde. Disponível em: <  
<https://arpo.ch/pt/produtos/arposafe-multi/>>. Acessado em 15 de junho 2021.

**Elaboração:** ENF Camilla Ferreira Catarino Barreiros COREN 263413

**Aprovação:** Divisão de Enfermagem (2019-2023).